

Monteringsvejledning (DK)

Montering af rygforlænger på x:panda

Monteringsveiledning (N)

Montering av ryggforlenger på x:panda

Asennusohje (FIN)

Selkänojan jatkeen asennus x:pandaan

Mounting instruction (GB)

Mounting back extension on the x:panda

Montageanleitung (D)

Montage der Rückenverlängerung an den x:panda

Montagehandleiding (NL)

Rugverlenging monteren op de x:panda

取付方法 (JP)



x : Panda用背もたれ延長部取付と調整

Monteringsvejledning

R82[®]

Montering af rygforlænger på x:panda

- 1) Montering og højdejustering af rygforlænger.
- 2) Montering af hovedstøtte på rygforlænger.
OBS! Stangen, der følger med rygforlænger, skal ikke anvendes.

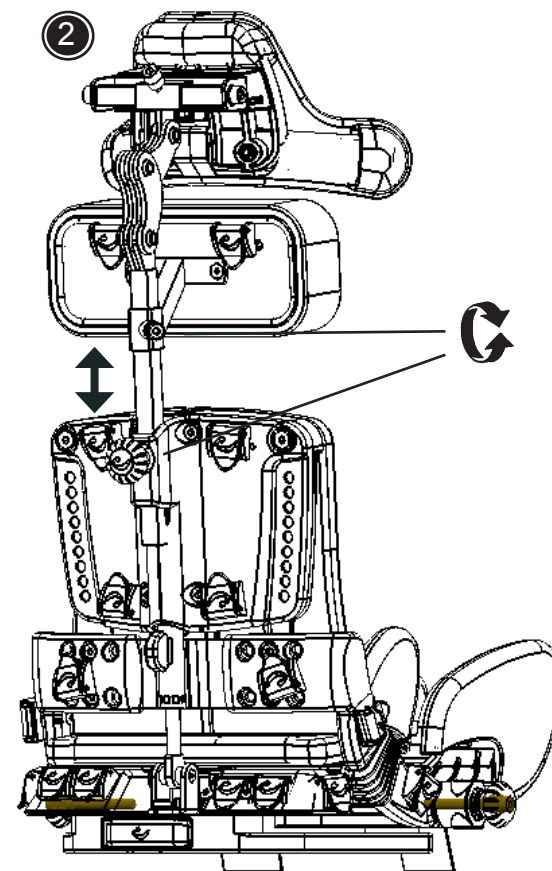
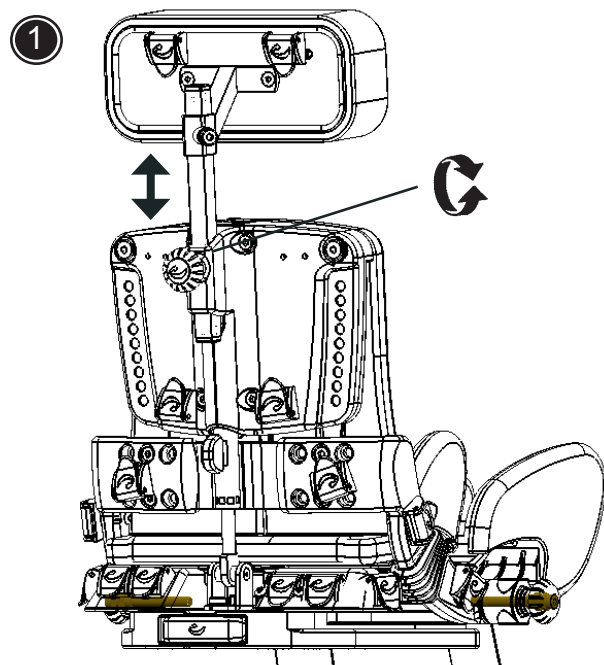


Monteringsveiledning

R82[®]

Montering av ryggforlenger på x:panda

- 1) Montering og høydejustering av ryggforlenger.
- 2) Montering av hodestøtte på ryggforlenger
OBS! Stangen som følger med ryggforlengeren skal ikke brukes.

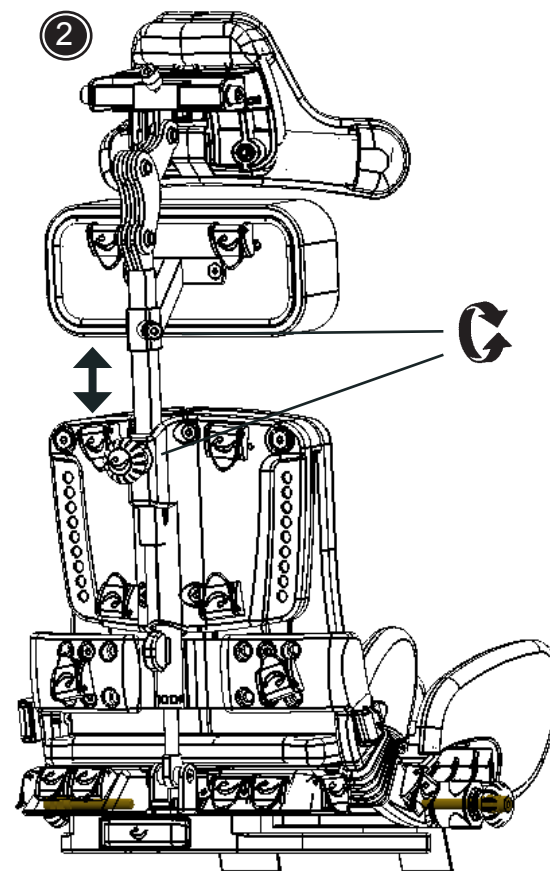
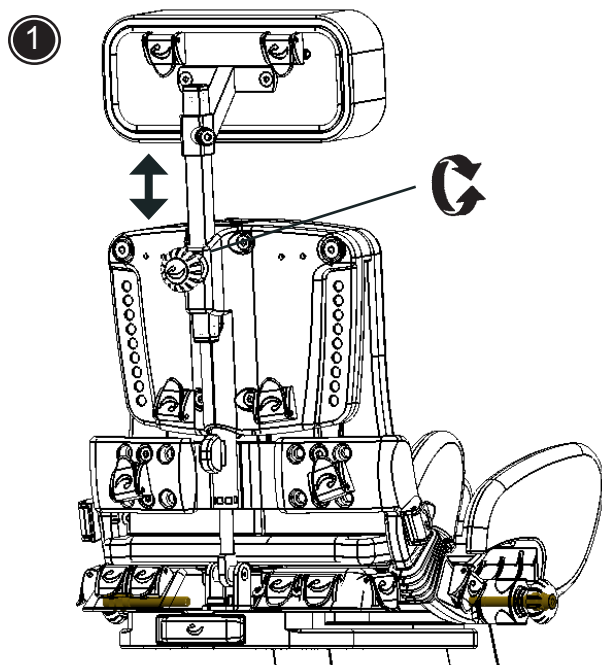


Asennusohje

R82[®]

Selkänojan jatkeen asennus x:pandaan

- 1) Selkänojan jatkeen asennus ja korkeussäätö.
- 2) Päätuen ja selkänojan jatkeen asennus yhdessä. Päätuen tankoa käytetään kiinnitystankona.

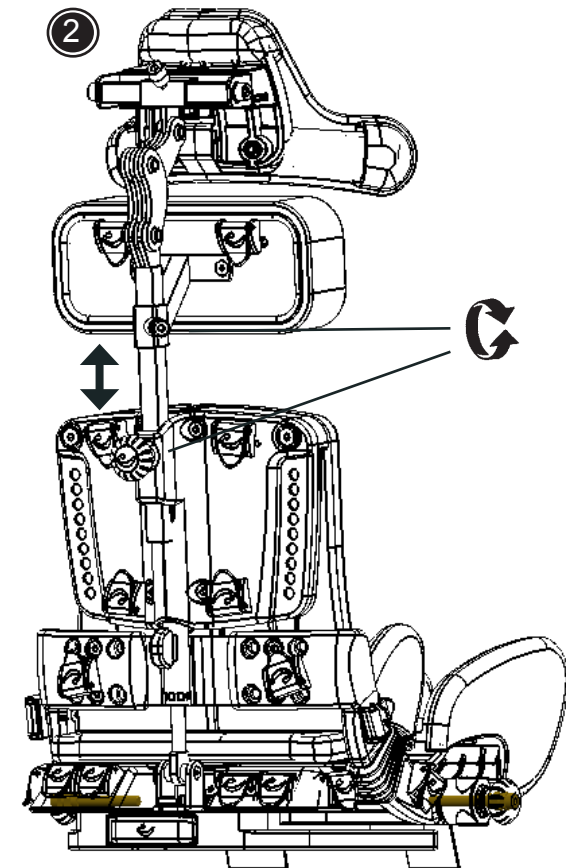
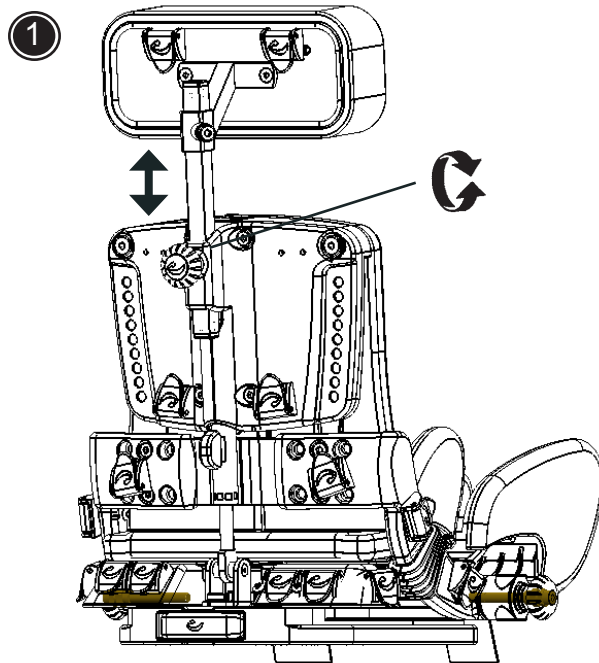


Mounting instruction

R82[®]

Mounting back extension on the x:panda

- 1) Mounting and height adjustment of back extension.
- 2) Mounting a head support and back extension together. Head support bar is used as a through bar to mount back extension.

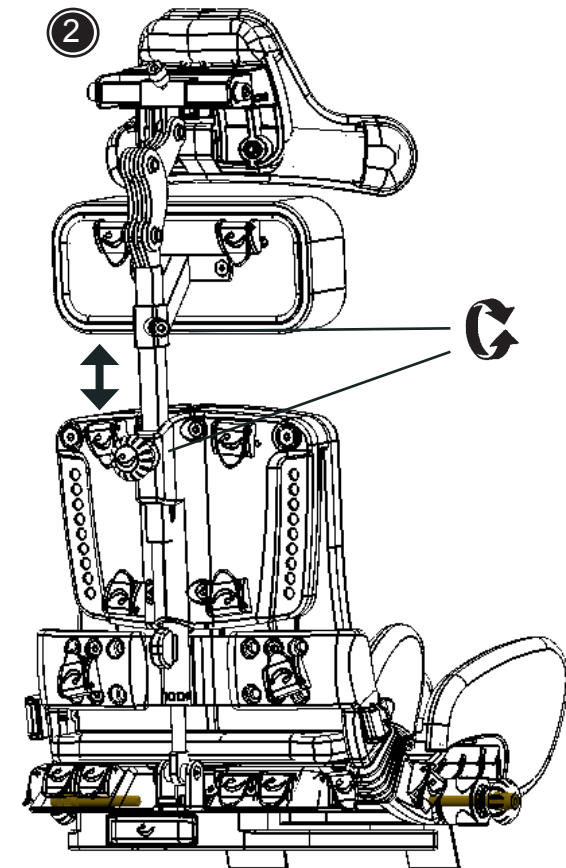
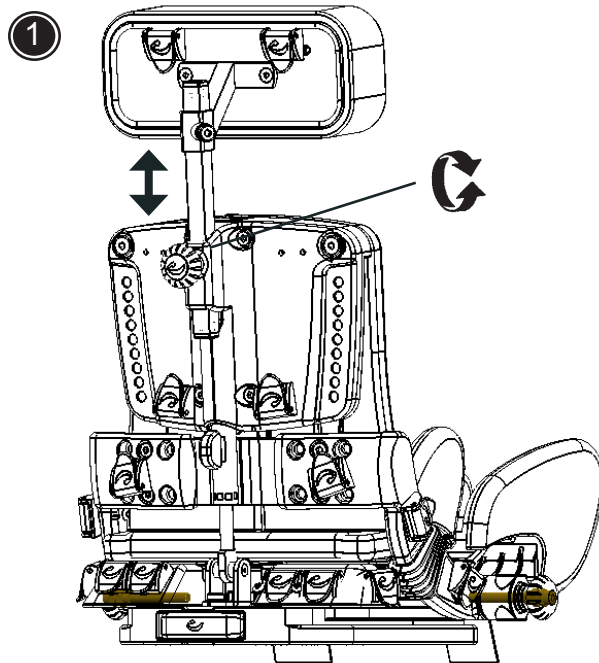


Montageanleitung

R82[®]

Montage der Rückenverlängerung an den x:panda

- 1) Montage und Höheneinstellung der Rückenverlängerung
- 2) Befestigen Sie die Rückenverlängerung an der Haltestange der Kopfstütze.
Die Rückenverlängerung kann in verschiedenen Höhen und der Haltestange der Kopfstütze befestigt werden.

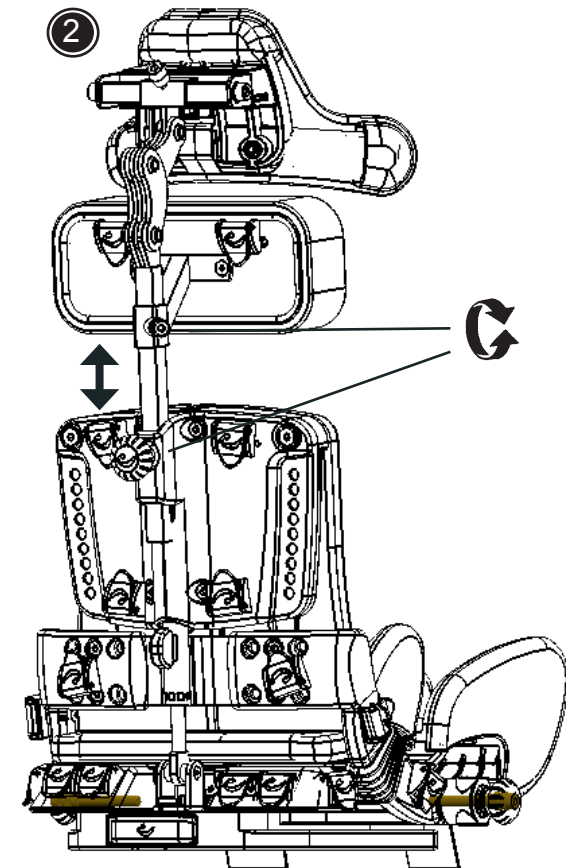
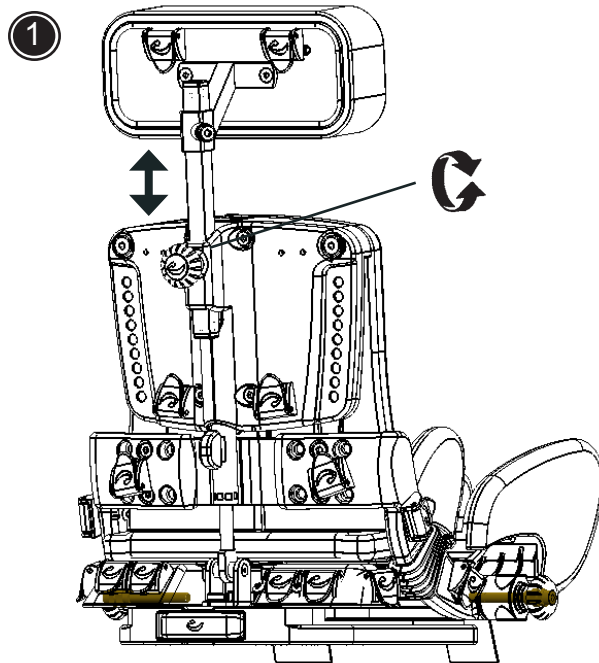


Montage-instructies

R82[®]

Rugverlenging monteren op de x:panda

- 1) Rugverlenging monteren en de hoogte instellen.
- 2) Een hoofdsteen en rugverlenging als één geheel monteren. De hoofdsteenbuis wordt als een doorvoerbuis gebruikt voor het monteren van de rugverlenging.

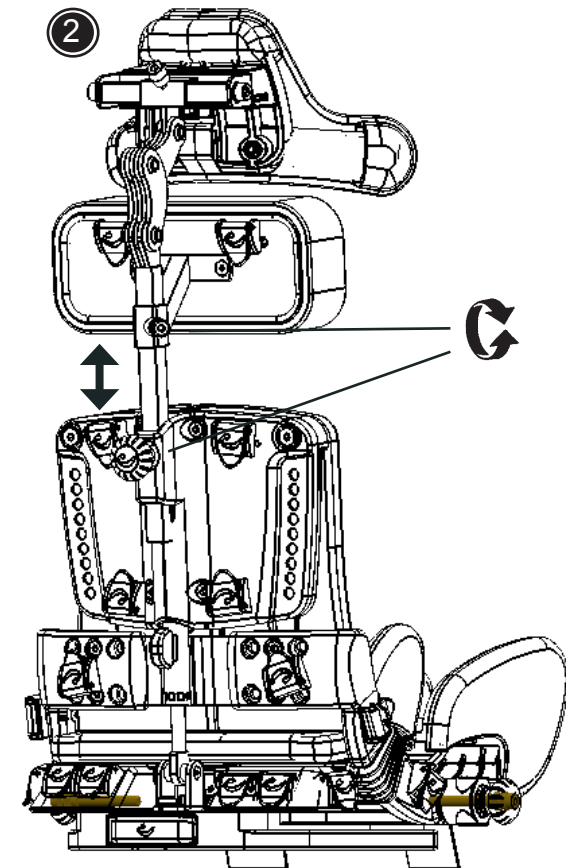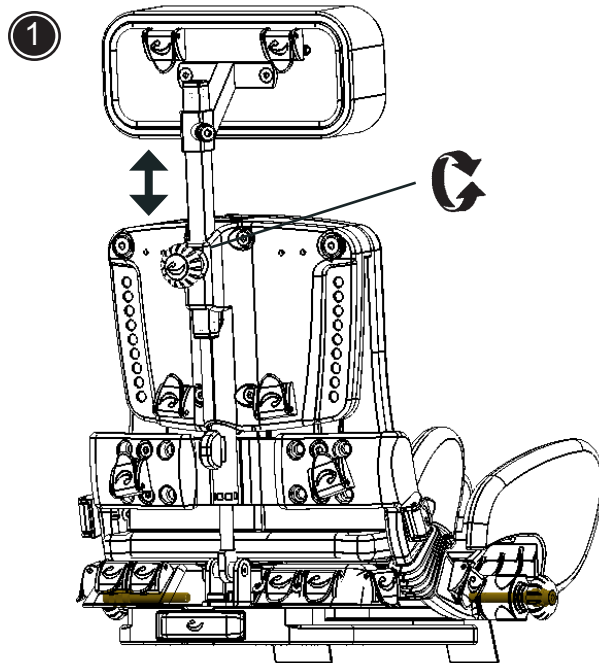

取付方法

R82[®]

x : Panda用背もたれ延長部取付と調整

- 1) 取付金具をシート（バック・サポート）に差込み、背もたれ延長部の高さをご希望の位置に調節してください。
- 2) ヘッド・サポートと背もたれ延長部は併用してご使用いただけます。
取付の際は、ヘッド・サポートの金具を背もたれ延長部に通してシートに取付けてください。

