


R82[®] 

mustang[™]

Deutsche Gebrauchsanweisung

INHALTSVERZEICHNIS

Mustang.....	3
Sicherheitsvorkehrungen.....	4
Garantie.....	4
Werkzeug.....	4
Vorbereitung für den Gebrauch.....	5
Entfernen der Mittelsäule.....	5
Brustpolster (Zubehör).....	6
Höhenverstellung.....	6
Winkelverstellung.....	6
Höhenverstellung der Brustpolstersäule.....	7
Verstellung des Brustpolsters.....	7
Feststellbremsen.....	8
Schleifbremse.....	8
Rücklaufstopp.....	8
Richtungsfeststeller.....	9
Zwischenstück für das Brustpolster (Zubehör).....	10
Bezug für das Brustpolster (Zubehör).....	10
Einstellung der Kopfstütze (Zubehör).....	11
Verstellung der Beckenpelotte (Zubehör).....	12
Verstellung des Rumpfpolsters (Zubehör).....	13
Handgriff, vorne (Zubehör).....	13
Unterarmauflagen, anterior oder posterior (Zubehör).....	14
Armauflage mit Handgriffe (Zubehör).....	14
Sitzeinstellung (Zubehör).....	15
Einstellung der Gesäßpelotte (Zubehör).....	15
Einstellung der Sitzhose (Zubehör).....	16
Ablagetasche (Zubehör).....	16
Einstellung des Schiebebügels (Zubehör).....	17
Justierung des Beinteilers (Zubehör).....	18
Höheneinstellungen.....	19
Zusammenklappen für den Transport.....	20
Produktidentifizierung.....	21
Wartung, Pflege und Wiedereinsatz.....	22
Fehlerbehebung.....	22
Abmessungen.....	23
Technische Daten.....	24
Hersteller.....	24
Vertreter.....	24

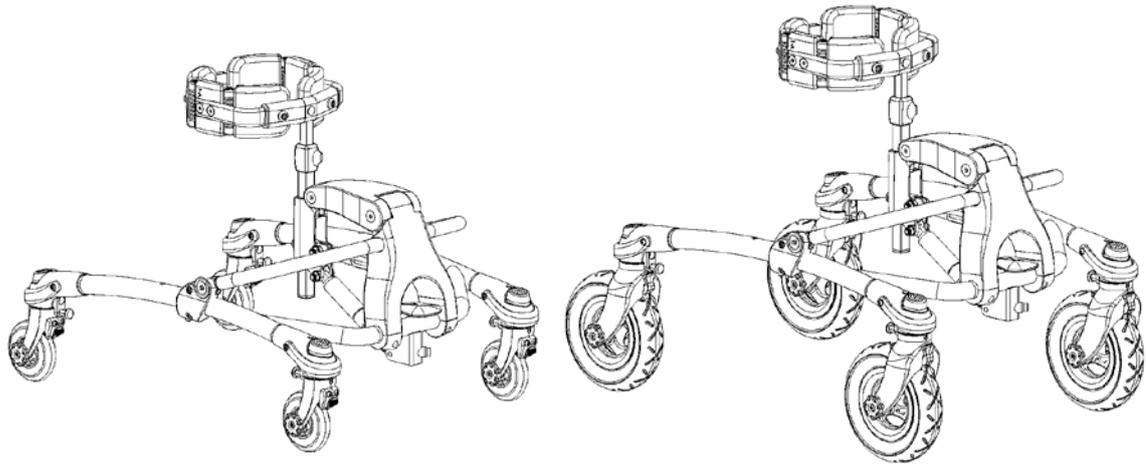

MUSTANG

Wir sind höchst erfreut, dass Sie sich für den R82 Mustang als neuen Gehtrainer für Ihr Kind entschieden haben.

Beim Mustang handelt es sich um einen Gehtrainer von R82 für Kinder, die beim Gehen Unterstützung benötigen. Der Mustang eignet sich bspw. für Kinder mit zerebraler Kinderlähmung bzw. für Kinder, die an einer Störung des Gleichgewichtssinns und der Motorik leiden.

Der Mustang ist in 4 Größen erhältlich. Der Mustang in Größe 1 ist mit vier 4-Zoll-Rollen ausgestattet und ausschließlich für den Zimmergebrauch vorgesehen. Der Mustang in Größe 2+3+4 verfügt über vier Vollgummiräder (200 x 50 mm) und eignet sich sowohl für den Zimmergebrauch als auch für den Einsatz im Freien.

Diese Gebrauchsanweisung soll dem Kind/der betreuenden Person bei der ordnungsgemäßen Verwendung des Mustang behilflich sein. Deshalb möchten wir Ihnen nahelegen, diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Verwendung des Mustang aufmerksam durchzulesen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der ersten Verwendung des Mustang aufmerksam durch und bewahren Sie sie für ein späteres Nachschlagen auf. Bei Nichtbefolgung der Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung könnte die Sicherheit des Kindes gefährdet sein.
- Nicht in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Modifikationen dürfen nur von autorisierten R82-Mitarbeitern vorgenommen werden.
- Das Produkt besitzt die CE-Kennzeichnung, mit der zertifiziert wird, dass es alle geltenden EU-Sicherheitsanforderungen erfüllt. Der Mustang wurde gemäß EN 1985 geprüft und zugelassen. Falls das Produkt umgebaut wird oder wenn Ersatz- und Zubehörteile verwendet werden, bei denen es sich nicht um Originalteile vom Hersteller R82 handelt, muss das CE-Zeichen entfernt werden.
- Die maximale Gebrauchsdauer dieses Produkts beträgt bei täglicher Verwendung 5 Jahre. Anschließend muss das Produkt (von R82-Mitarbeitern) überholt werden, um die Gebrauchsdauer zu verlängern.
- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt in diesem Produkt gehen. Sorgen Sie für eine permanente Beaufsichtigung durch eine erwachsene Person. Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Produkts könnte sich Ihr Kind schwer verletzen.
- Dieses Produkt wurde nur für die Nutzung durch eine Person konzipiert. Verwenden Sie stets nur ein Kind in diesem Produkt.
- Falls das Gewicht/die Größe des Kindes im Bereich der angegebenen maximalen Belastbarkeit/Körpergröße liegt und das Kind sich heftig und unkontrolliert bewegt (bspw. hin- und herwiegt), sollten Sie eine größere Ausführung mit einer höheren maximalen Belastbarkeit in Erwägung ziehen.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass sämtliche Fixierungen und Verstellungen ordnungsgemäß platziert und befestigt sind

GARANTIE

R82 gewährt eine Garantie von 2 Jahren auf die Verarbeitung und das Material sowie eine Garantie von 5 Jahren auf das Metallgestell (gegen Bruchschäden an Schweißnähten). Die Garantie erlischt, wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur täglichen Pflege und/oder Wartung gemäß den vom Hersteller vorgegebenen und/oder in der Bedienungsanleitung genannten Richtlinien und Intervallen nicht nachkommt. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage von R82 unter „Download“. Ein Garantieanspruch besteht nur, wenn das R82-Produkt in demselben Land benutzt wird, in dem es erworben wurde, und wenn sich das Produkt anhand seiner Seriennummer identifizieren lässt. Von der Garantie ausgeschlossen sind Unfallschäden sowie Schäden, die durch falsche Verwendung oder Fahrlässigkeit verursacht wurden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, die beim Gebrauch des Produkts der üblichen Abnutzung ausgesetzt sind und regelmäßig ausgetauscht werden müssen. Die Garantie ist nichtig, wenn Ersatz- und Zubehörteile von Drittanbietern verwendet werden (nur R82-Originalteile sind zulässig) oder wenn das Produkt von einer Person repariert oder modifiziert wird, die nicht entsprechend von R82 autorisiert und geschult ist. R82 behält sich das Recht vor, das fragliche Produkt sowie die relevanten Unterlagen in Augenschein zu nehmen, bevor ein Garantieanspruch anerkannt wird, und zu entscheiden, ob das defekte Produkt ausgetauscht oder repariert wird. Der Kunde ist verpflichtet, das fragliche Produkt (zu dem der Garantieanspruch geltend gemacht wird) an die Kaufadresse zurückzugeben. Die Garantie wird von R82 nachträglich gewährt.

WERKZEUG

1 x 5 mm Inbusschlüssel ist beigelegt.


VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

- Das Gestell aus dem Karton nehmen
- Die Schnellspanner (A) entriegeln
- Das Gestell (B) ausklappen
- Entfernen Sie den Schaumstoffschutz
- Die Schnellspanner (C) verriegeln

Das Brustpolster (Zubehör) montieren und die Schrauben (D) mit dem beiliegenden 5-mm-Inbusschlüssel festziehen.


 Vergewissern Sie sich, dass die Inbusschrauben festgezogen sind, bevor Sie den Mustang verwenden. Überprüfen Sie möglichst oft sämtliche Schrauben und Verstellungen.


 Achten Sie darauf, dass Sie sich Ihre Finger nicht in den Löchern des Gestells einklemmen.

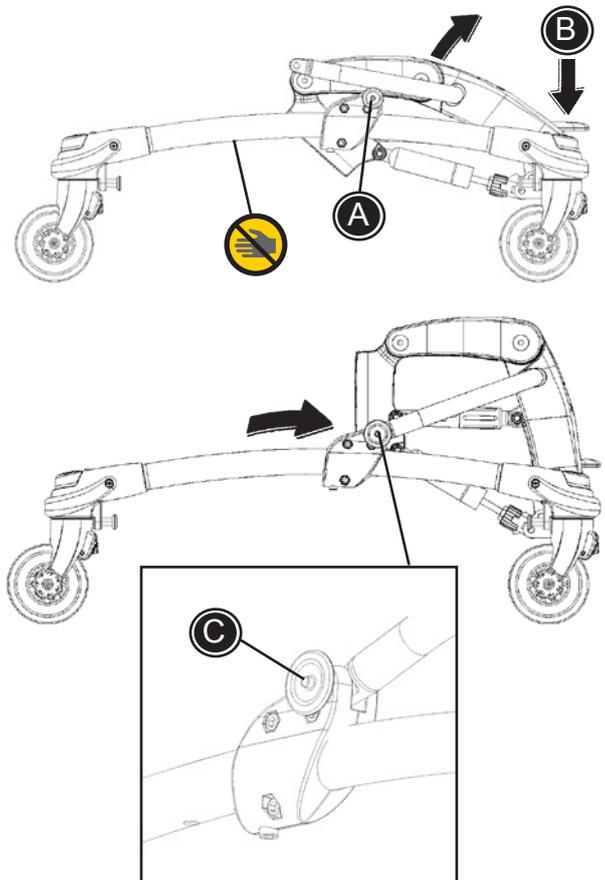

ENTFERNEN DER MITTELSÄULE

1. Drücken Sie den Sicherungsbolzen (A) und schieben Sie das Rohr den halben Weg nach oben
2. Drücken Sie erneut den Sicherungsbolzen (A) und entfernen Sie das Rohr nun vollständig

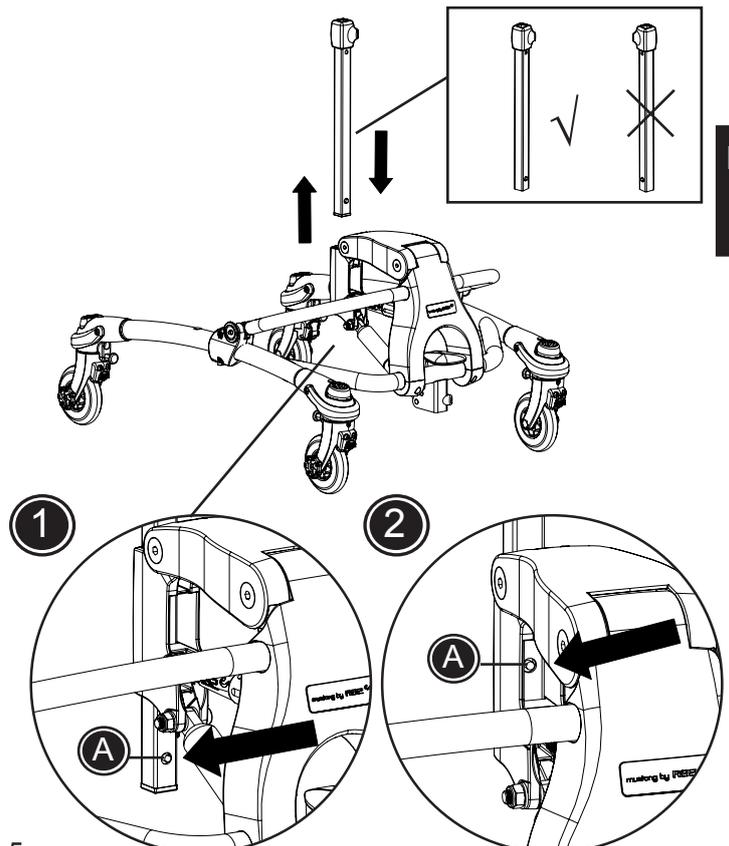

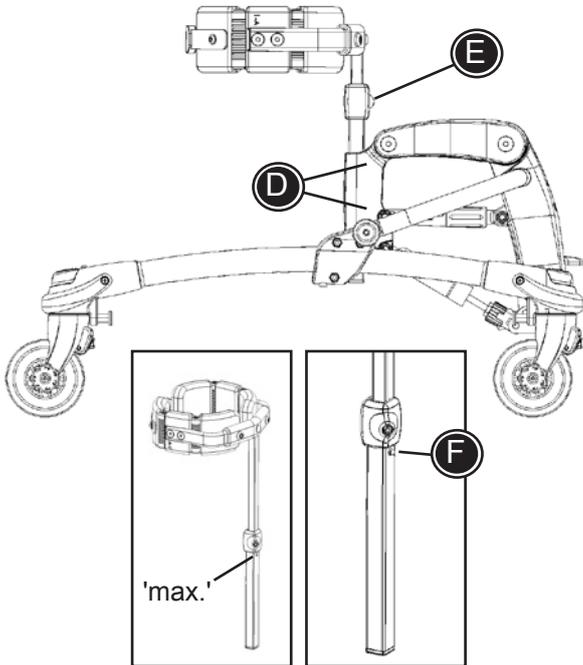


BRUSTPOLSTER (ZUBEHÖR)

Montage

- Befestigen Sie die Aufnahme für das Brustpolster und ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe eines 5 mm Inbusschlüssel an
- Befestigen Sie das Brustpolster in der Aufnahme und ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe eines 5 mm Inbusschlüssel an.


 Wenn der Sicherheitsstift (F) "heraus clickt" ist die maximale Höhe des Brustpolster erreicht

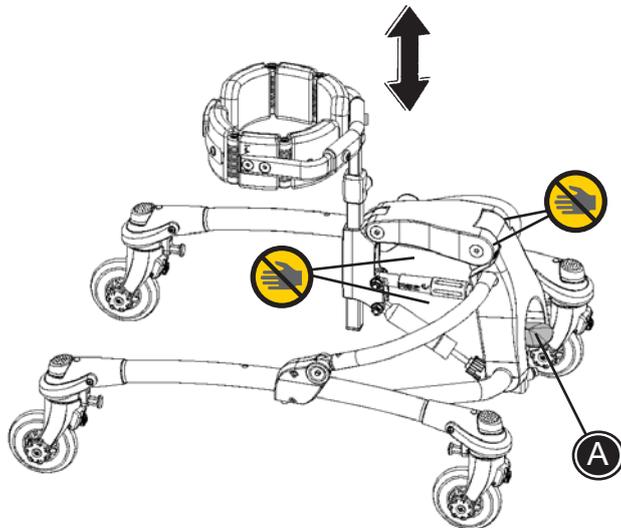

HÖHEN- VERSTELLUNG

- Betätigen Sie das Pedal (A), um die Höhe der Brustpolstersäule zu verstellen

 Achten Sie darauf, dass Ihre Finger bei der Höhenverstellung des Brustpolsters nicht eingeklemmt werden.

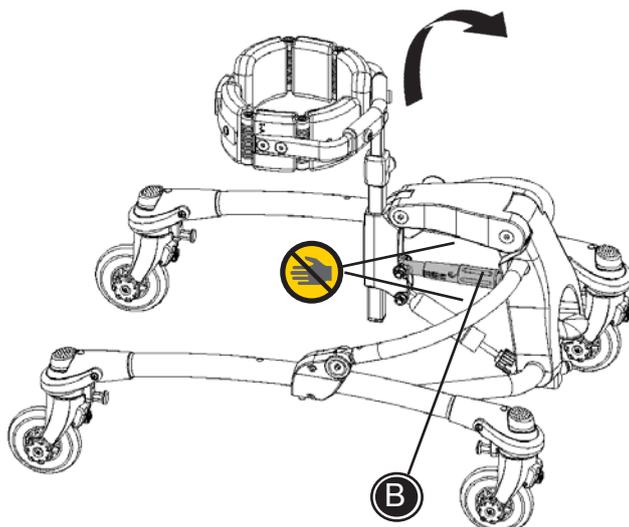

WINKEL- VERSTELLUNG

- Drehen Sie an der Spindel (B), um die Neigung der Brustpolstersäule zu verstellen

 Achten Sie darauf, dass Ihre Finger bei der Winkelverstellung des Brustpolsters nicht eingeklemmt werden


HÖHENVERSTELLUNG DER BRUSTPOLSTER-SÄULE

Verwenden Sie den beiliegenden 5-mm-Inbusschlüssel zur Höhenverstellung der Brustpolstersäule.

! BEACHTEN Sie die maximale Höhenangaben!

! Vergewissern Sie sich, dass die Madenschrauben festgezogen sind, bevor Sie den Mustang verwenden. Überprüfen Sie möglichst oft sämtliche Schrauben und Verstellungen.

! Stellen Sie die Mittelsäule nicht höher ein als in die gekennzeichnete "max." Position. Stellen Sie sicher, dass alle Madenschrauben (C) an der Mittelsäule vor dem Benutzen des Mustangs wieder fest angezogen sind.

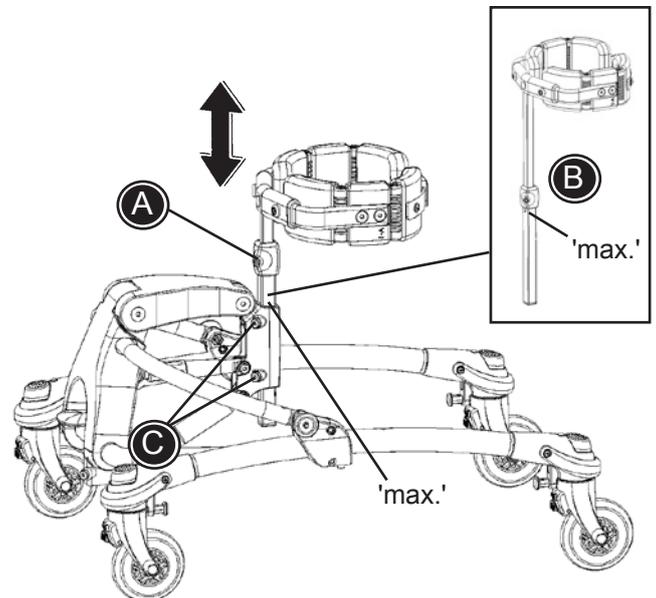

VERSTELLUNG DES BRUSTPOLSTERS


- Lösen Sie die Schrauben (A), um die Breite des Brustpolsters zu verstellen

! Die Brustpolster NICHT über die „Max.“-Anzeige hinaus verstellen


- Die Schrauben (B) und (C) lösen, um die Brustpolster einzeln zu verstellen. Wir empfehlen, die Schrauben (C) nicht festzuziehen, um das Brustpolster leicht bewegen zu können.
- Befestigen Sie das Brustpolster mit den Gurten und Schnallen auf der Rückseite.

! Vergewissern Sie sich, dass die Madenschrauben festgezogen sind, bevor Sie den Mustang verwenden. Überprüfen Sie möglichst oft sämtliche Schrauben und Verstellungen.

! Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch sämtliche Gurte und Schnallen, und tauschen Sie ggf. jegliche abgenutzten Teile aus.

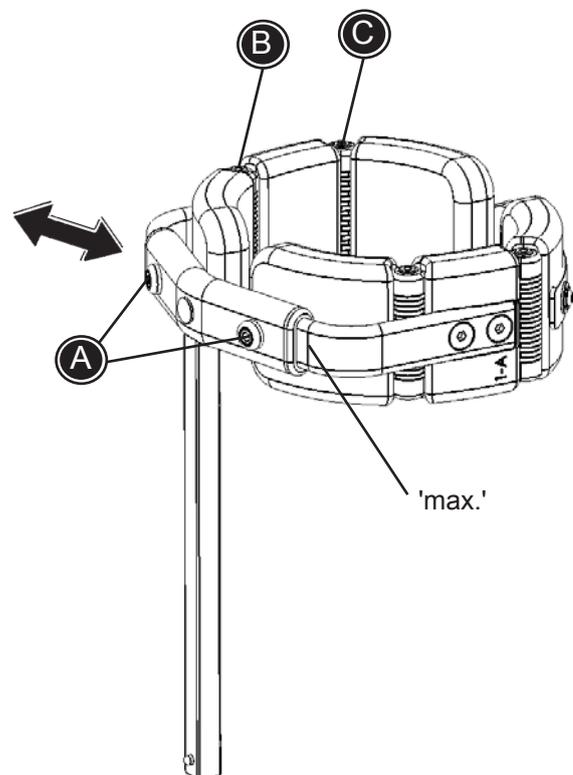

D

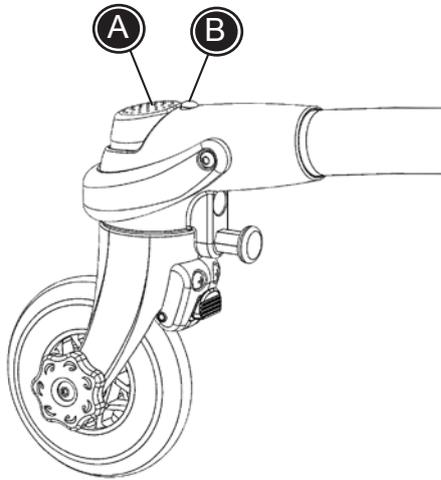


FESTSTELLBREMSEN

Standardmäßig ist der Mustang mit Feststellbremsen an allen vier Rädern ausgestattet.

- Drücken Sie mit Ihrem Fuß auf den großen Druckknopf (A) um die Bremse zu aktivieren
- Drücken Sie mit ihrem Fuß auf den kleinen Druckknopf (B) um die Bremse zu deaktivieren

! Vergewissern Sie sich, dass alle vier Bremsen festgestellt sind, bevor Sie Ihr Kind in den Mustang setzen/stellen.

! Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Festbremse vor jeder Benutzung. Kontaktieren Sie einen autorisierten Fachhändler, wenn die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist.

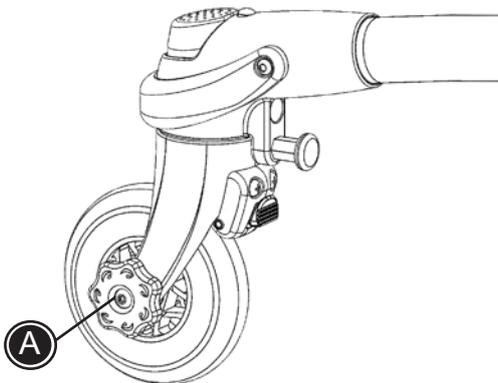


SCHLEIFBREMSE

Standardmäßig ist der Mustang mit Schleifbremsen an allen vier Rädern ausgestattet.

- Ziehen Sie den Griff (A) unterschiedlich fest an, um die für die Bewegung des Mustang erforderliche Kraft zu regulieren

D

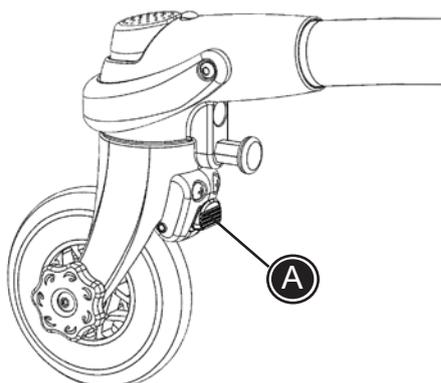

RÜCKLAUFSTOPP

Standardmäßig ist der Mustang mit Rücklaufstopp an allen vier Rädern ausgestattet.

- Schieben Sie die Rücklaufstopper nach unten, um sie zu betätigen
- Schieben Sie die Rücklaufstopper nach oben, um sie zu lösen

! Die Rücklaufstopper funktionieren nur, wenn die Richtungsfeststeller betätigt wurden

RICHTUNGS- FESTSTELLER




Standardmäßig ist der Mustang mit Richtungsfeststellern an allen vier Rädern ausgestattet. Mit den Richtungsfeststellern werden die Räder in einer Position fixiert, die nur eine Geradeausbewegung zulässt.


- 1) Ziehen Sie zur Betätigung der Richtungsfeststeller am Knopf (1A), drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn (1B) und lassen Sie den Knopf dann los, damit er in den Schlitz einrastet.

Der Knopf sollte sich dann in der Position befinden, die in (1C) dargestellt ist. Auf diese Weise werden die Vorderräder in einer Position fixiert, die nur eine Geradeausbewegung zulässt.

- 2) Ziehen Sie zum Lösen der Richtungsfeststeller am Knopf (2A), drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn (2B), sodass er nicht mehr in den Schlitz einrastet, und lassen Sie den Knopf dann los.

Der Knopf sollte sich dann in der Position befinden, die in (2C) dargestellt ist. Jetzt können sich die Vorderräder wieder in jede beliebige Richtung drehen

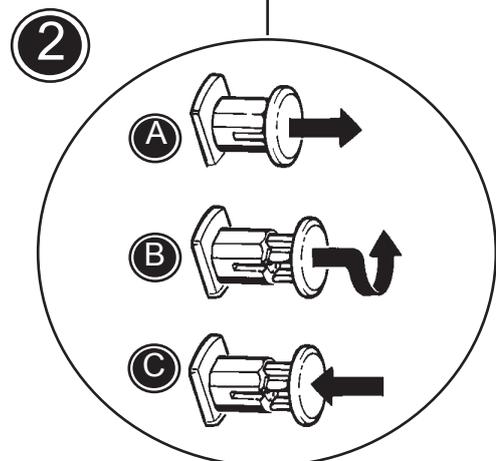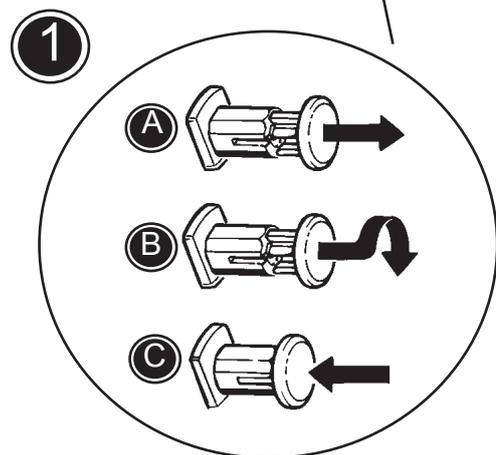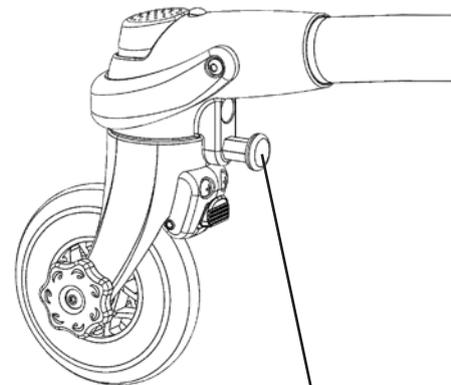

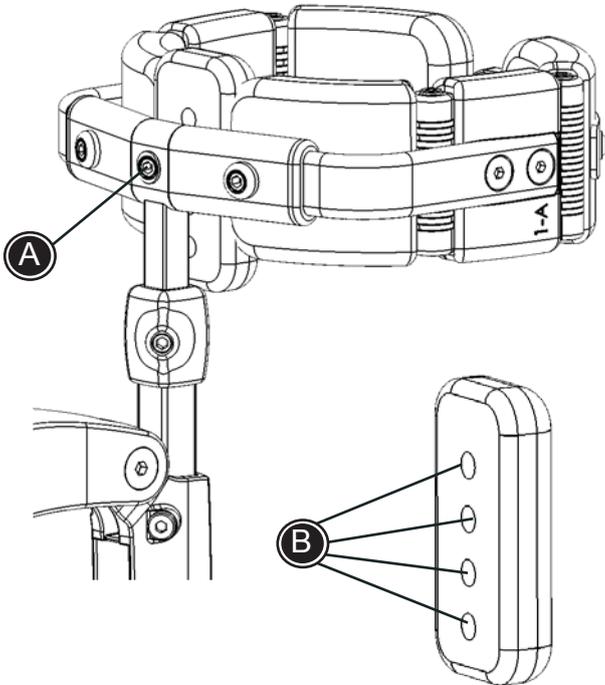


ZWISCHENSTÜCK FÜR DAS BRUSTPOLSTER (ZUBEHÖR)

- Schraube (A) demontieren, um die Höhe des Zwischenstücks zu verstellen.
- Schraube (A) wieder in einem der Löcher im Zwischenstück (B) montieren.

Verwenden Sie den beiliegenden 5-mm-Inbuschlüssel für alle Montagearbeiten.

! Vergewissern Sie sich, dass die Madschrauben festgezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden. Überprüfen Sie möglichst oft sämtliche Schrauben und Verstellungen.

D

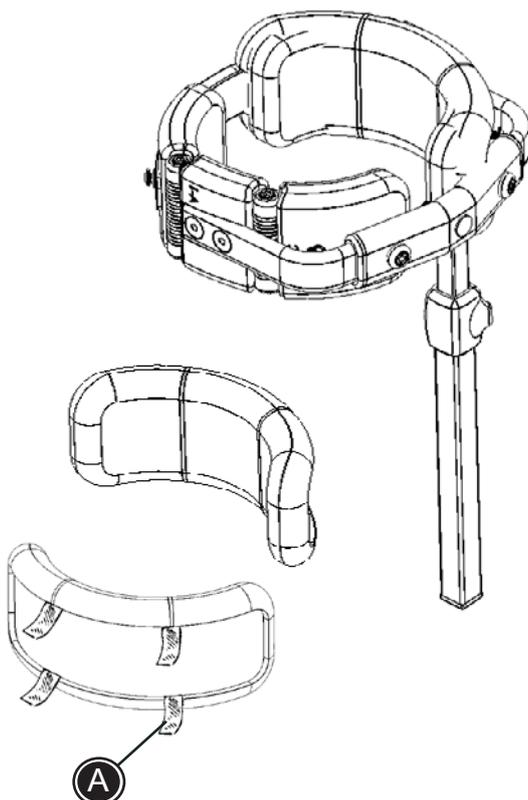

BEZUG FÜR DAS BRUSTPOLSTER (ZUBEHÖR)

Um zusätzlichen Komfort zu bieten, lässt sich ein Bezug auf den jeweiligen Brustpolstern anbringen.

- Klettband (A) lösen und Bezug abnehmen, bspw. zum Waschen (40 °C)

! Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch sämtliche Gurte und Schnallen, und tauschen Sie ggf. jegliche abgenutzten Teile aus.

EINSTELLUNG DER KOPFSTÜTZE (ZUBEHÖR)

- Neigungsverstellung der Kopfstütze (A)
- Höhenverstellung (B)


 Die Kopfstütze NICHT über die „Max.“-Anzeige hinaus verstellen


- Neigungsverstellung des Kopfstützensystems (C)

Verwenden Sie den beiliegenden 5-mm-Inbuschlüssel für alle Montagearbeiten.

 Achten Sie darauf, dass Ihre Finger bei der Verstellung der Kopfstütze nicht eingeklemmt werden.

 Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Schrauben und Griffe festgezogen wurden. Überprüfen Sie möglichst oft sämtliche Schrauben und Griffe.

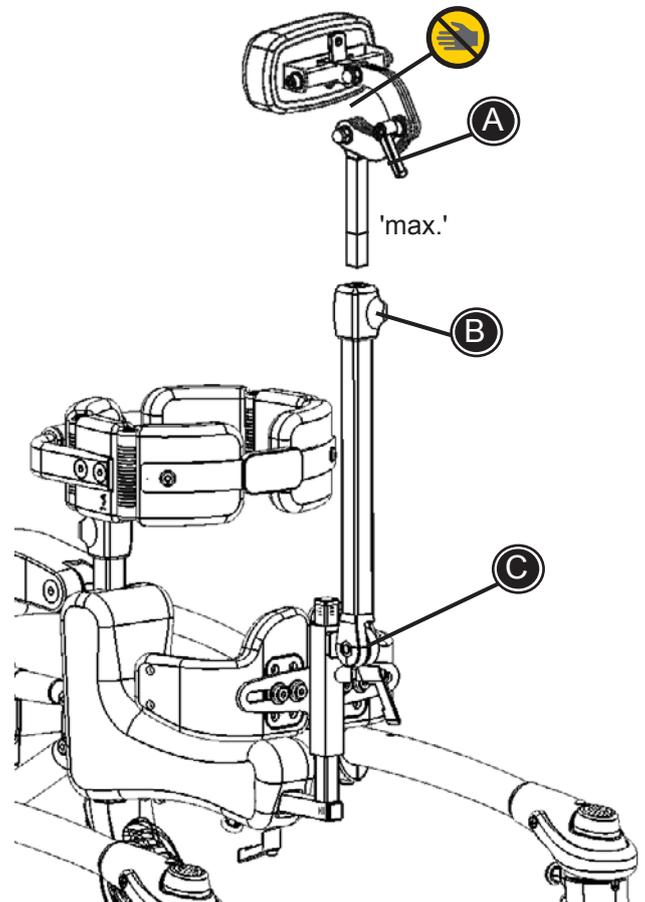

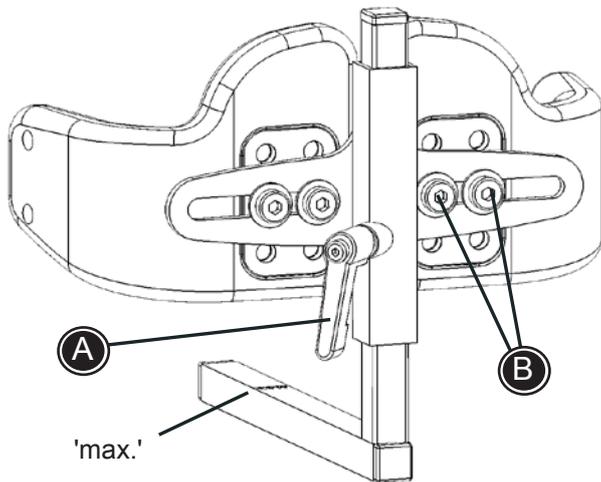

VERSTELLUNG DER BECKENPELOTTE (ZUBEHÖR)

- Höheneinstellung (A)
- Höhen- und Breitereinstellung (B)

Verwenden Sie den beiliegenden 5-mm-Inbus-
schlüssel für alle Montagearbeiten.



Die Rückenpelotte NICHT über die „Max.“-
Anzeige hinaus verstellen.



Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch,
dass alle Schrauben und Griffe festgezo-
gen wurden. Überprüfen Sie möglichst oft
sämtliche Schrauben und Griffe.


VERSTELLUNG DES RUMPFPOLSTERS (ZUBEHÖR)

Höheneinstellung an der Säule (A)
Höheneinstellung am Rumpfpolster (B)

Verwenden Sie den beiliegenden 5-mm-Inbuschlüssel für alle Montagearbeiten.

! BEACHTEN Sie die maximale Höhenangabe an der Mittelsäule.

! Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Schrauben und Griffe festgezogen wurden. Überprüfen Sie möglichst oft sämtliche Schrauben und Griffe.

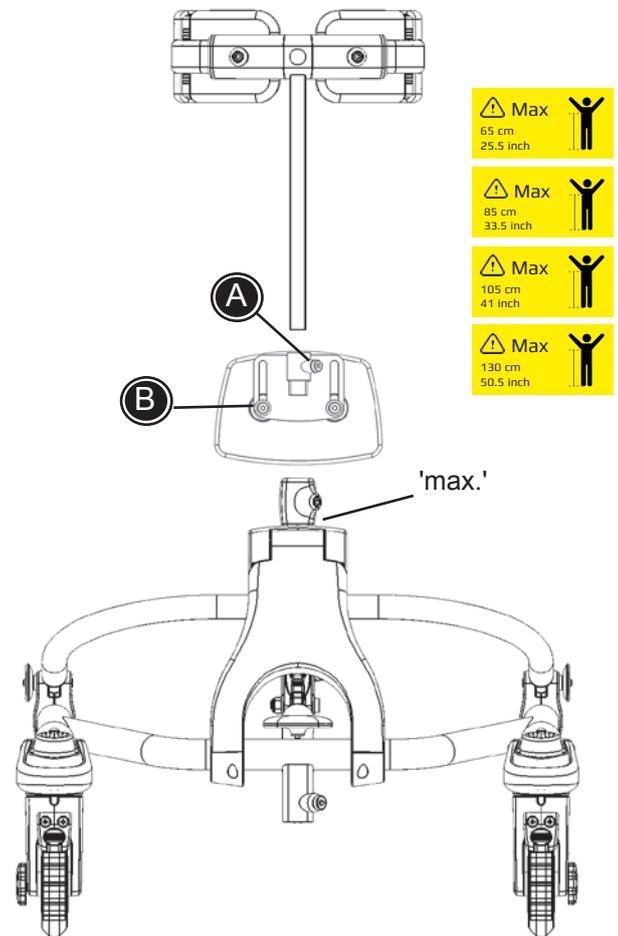


HANDGRIFF, VORNE (ZUBEHÖR)

Höheneinstellung (A)
Tiefeneinstellung (B)



Verwenden Sie den beiliegenden 5-mm-Inbuschlüssel für alle Montagearbeiten.

! BEACHTEN Sie die maximale Höhenangabe an der Mittelsäule.

! Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Schrauben und Griffe festgezogen wurden. Überprüfen Sie möglichst oft sämtliche Schrauben und Griffe.

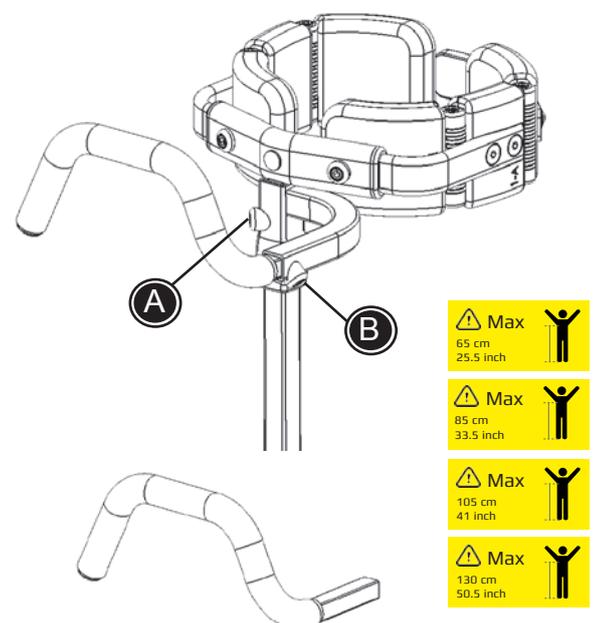

D

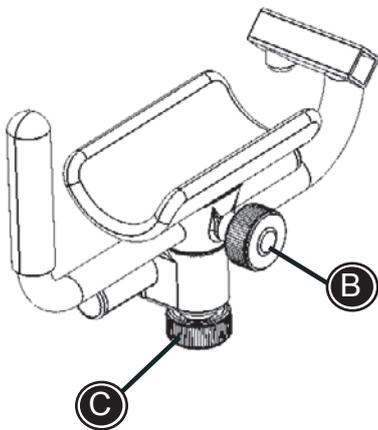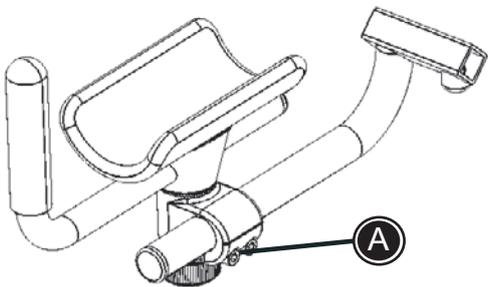

Max
65 cm
25.5 inch



Max
85 cm
33.5 inch



Max
105 cm
41 inch



Max
130 cm
50.5 inch



UNTERARM- AUFLAGEN, ANTERIOR ODER POSTERIOR (ZUBEHÖR)

- Neigungs- und Tiefeneinstellung (A)
- Neigungs- und Tiefeneinstellung (B)
- Schwenkverstellung (C)

Verwenden Sie den beiliegenden 5-mm-Inbus-
schlüssel für alle Montagearbeiten

! BEACHTEN Sie die maximale Höhenang-
abe an der Mittelsäule.

! Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch,
dass alle Schrauben und Griffe festgezo-
gen wurden. Überprüfen Sie möglichst oft
sämtliche Schrauben und Griffe.

ARMAUFLAGE MIT HANDGRIFFE (ZUBEHÖR)


- Neigungs- und Tiefeneinstellung (A)
- Neigungseinstellung (B)

Verwenden Sie den beiliegenden 5-mm-Inbus-
schlüssel für alle Montagearbeiten.

! BEACHTEN Sie die maximale Höhenang-
abe an der Mittelsäule.

! Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch,
dass alle Schrauben und Griffe festgezo-
gen wurden. Überprüfen Sie möglichst oft
sämtliche Schrauben und Griffe.

D

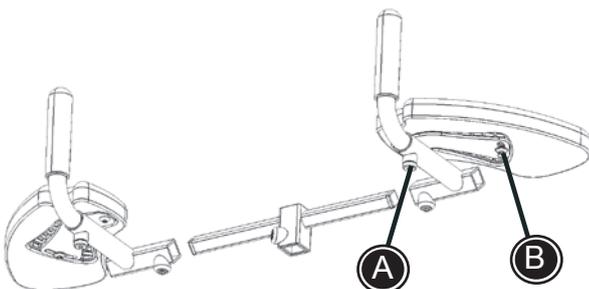

Max
65 cm
25.5 inch



Max
85 cm
33.5 inch



Max
105 cm
41 inch



Max
130 cm
50.5 inch




SITZEINSTELLUNG (ZUBEHÖR)

- Höheneinstellung (A)

Verwenden Sie den beiliegenden 5-mm-Inbus-schlüssel für alle Montagearbeiten.

! Stellen Sie sicher, dass der Beschlag des Sitzes sich oberhalb des Sicherungsbolzen (B) an der Stange des Brustpolsters befindet, bevor Sie die Schraube (A) festziehen.

! Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Schrauben und Griffe festgezogen wurden. Überprüfen Sie möglichst oft sämtliche Schrauben und Griffe.

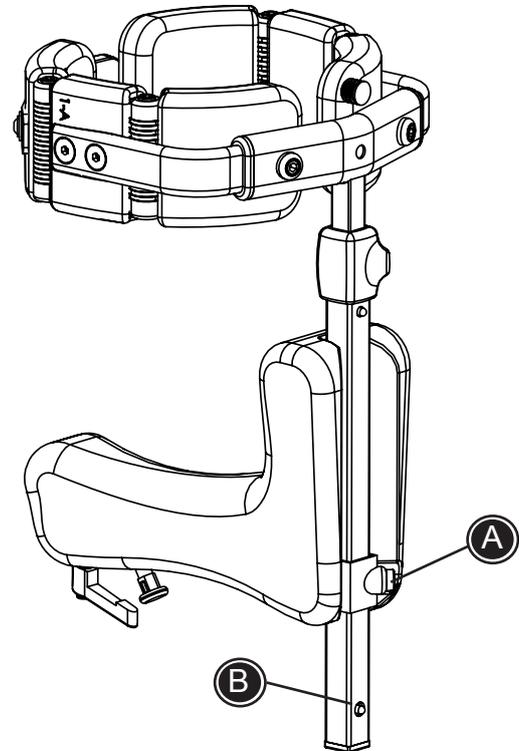


EINSTELLUNG DER GESÄSSPELOTTE (ZUBEHÖR)


- Höheneinstellung (A)
- Tiefeneinstellung. Lösen Sie zunächst den Hebel (B), ziehen dann den Sicherheits-schnapper (A) heraus, um die Gesäßpelotte abnehmen zu können..

! Die Pelotte NICHT über die „Max.“-Anzeige hinaus verstellen.

! Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Schrauben und Griffe festgezogen wurden. Überprüfen Sie möglichst oft sämtliche Schrauben und Griffe.

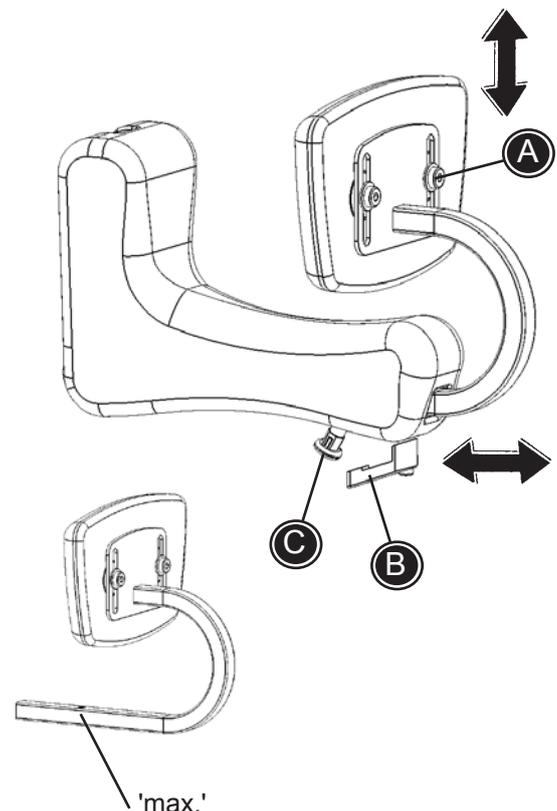

D

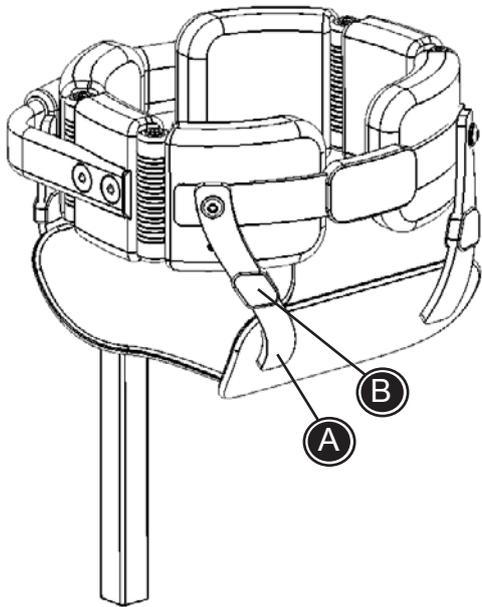


EINSTELLUNG DER SITZHOSE (ZUBEHÖR)

Nur für Größe 1+2 erhältlich.

- Ziehen Sie an den Gurten, um die Höhe zu verstellen (A)
- Durch Lösen der Schnallen kann die Sitzhose entfernt werden (B)

! Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch des Produkts sämtliche Gurte und Schnallen, und tauschen Sie ggf. jegliche abgenutzten Teile aus.

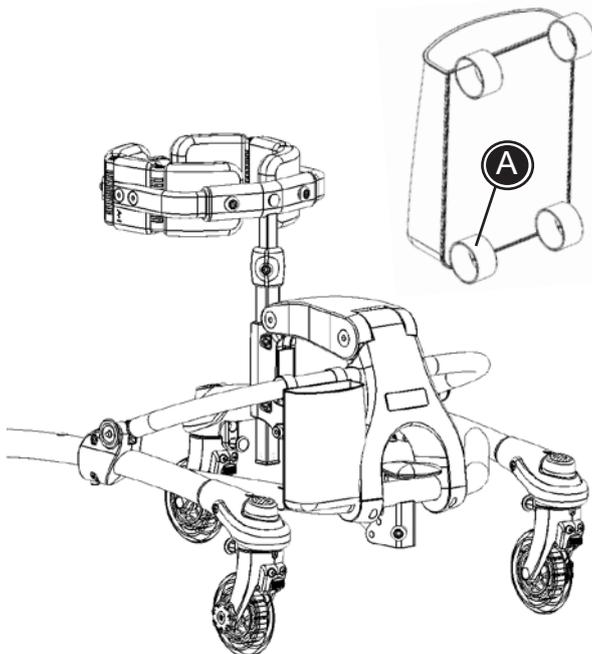

ABLAGETASCHE (ZUBEHÖR)

Die Tasche lässt sich an diversen Punkten am Gestell anbringen und wird mit Klettband (A) befestigt.

Klettband (A) lösen und die Tasche abnehmen, bspw. zum Waschen (40 °C).

! Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch des Produkts sämtliche Gurte und Schnallen, und tauschen Sie ggf. jegliche abgenutzten Teile aus.

EINSTELLUNG DES SCHIEBEBÜGELS (ZUBEHÖR)

Neigungseinstellung (A)


Die Schraube (B) lösen und den Sicherungssplint (C) drücken, um die Lenkstange zu demontieren.

Verwenden Sie den beiliegenden 5-mm-Inbuschlüssel für alle Montagearbeiten.

 Den Schiebebügel NICHT zum Anheben des Mustang verwenden. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen des Kindes führen.

 Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben festgezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden. Überprüfen Sie möglichst oft sämtliche Schrauben und Verstellungen.

 Achten Sie darauf, dass Ihre Finger beim Verstellen des Schiebebügels nicht eingeklemmt werden.

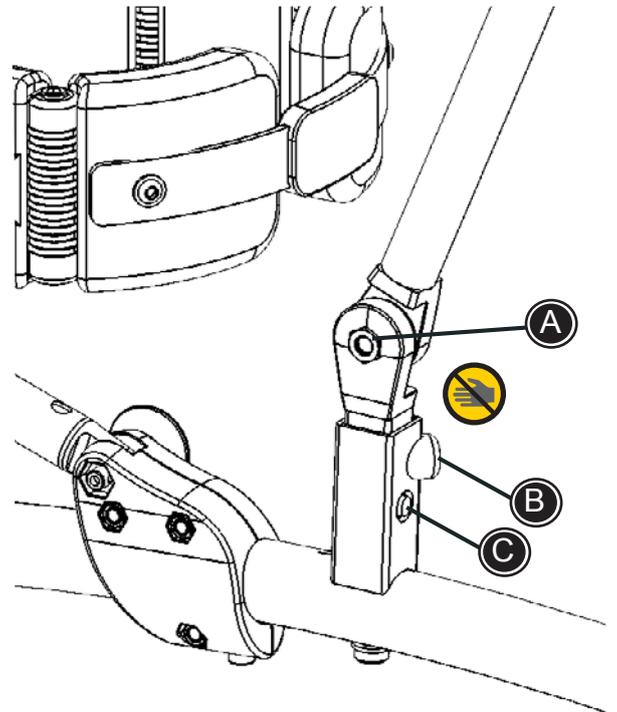

JUSTIERUNG DES BEINTEILERS (ZUBEHÖR)


Montage (A)

Verwenden Sie den beiliegenden 5-mm-Inbus-schlüssel für alle Montagearbeiten.

 Vergewissern Sie sich, dass die Halterung des Beinteilers komplett in die Aufnahme eingeführt ist, bevor Sie den Beinschutz befestigen.

 Achten Sie darauf, dass Ihre Finger und die Zehen Ihres Kindes nicht zwischen Beinschutz und Boden bzw. zwischen Beinschutz und Sitz eingeklemmt werden.



 Vergewissern Sie sich, dass die Madschrauben festgezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden. Überprüfen Sie möglichst oft sämtliche Schrauben und Verstellungen.

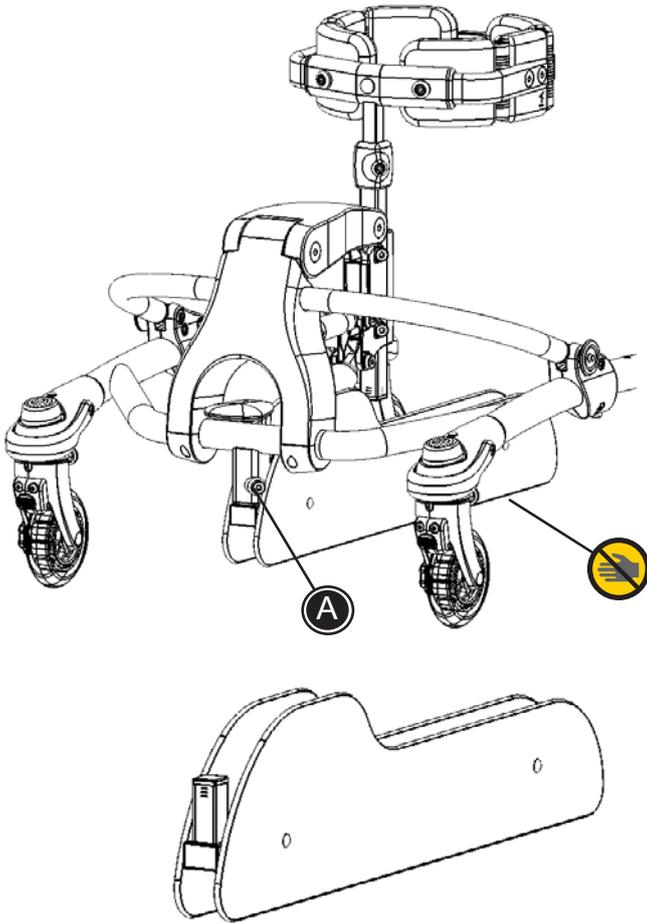

HÖHEN- EINSTELLUNGEN

Standardmäßig ist am Mustang das Loch 2 für die Höheneinstellung ausgewählt. Der Mustang lässt sich jedoch auch absenken oder in eine höhere Position bringen.

- 1) Den Schnellspanner (A) öffnen
- 2) Die Schrauben (B) lösen
- 3) Die Schraube (C) entfernen
- 4) Das Gestell justieren und die Schraube (C) wieder in einem Loch des Gestells montieren.
Die Schrauben (B) festziehen und den Schnellspanner (A) wieder verriegeln

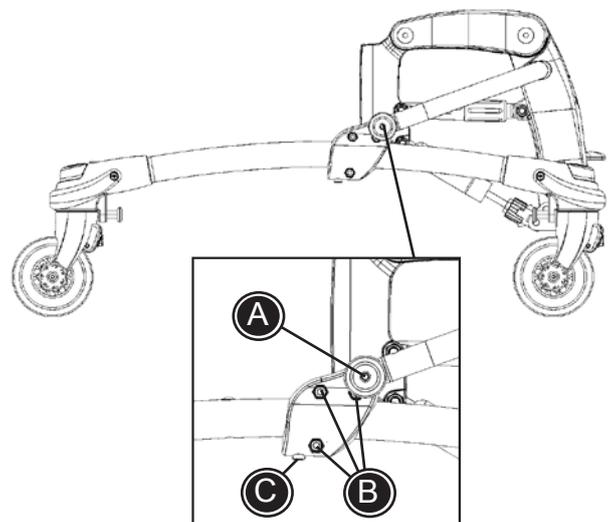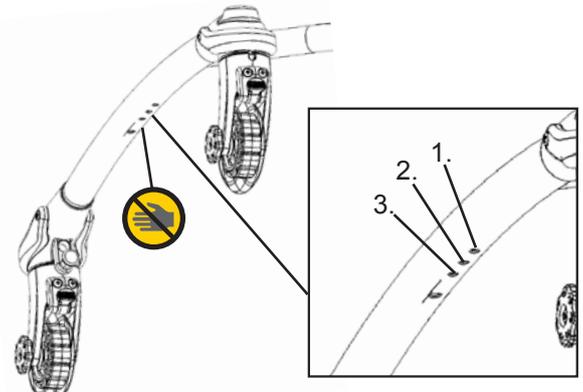


! Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass alle Schrauben und Griffe festgezogen wurden. Überprüfen Sie möglichst oft sämtliche Schrauben und Griffe.

! Achten Sie darauf, dass Sie sich Ihre Finger nicht in den Löchern des Gestells einklemmen.

	Größe 1			Größe 2		
	Loch 1	Loch 2	Loch 3	Loch 1	Loch 2	Loch 3
Höhe zwischen Boden und Achsel	46½-65 cm	43-65 cm	38-65 cm	61½-80 cm	60-80 cm	59-80 cm
Höhe zwischen Boden und Achsel (mit Unterarm-Auflagen)	51-65 cm	47½-65 cm	42-65 cm	65½-80 cm	64-80 cm	63-80 cm
Höhe zwischen Sitz und Boden	26-37½ cm	17-35 cm	11-29 cm	34½-51½ cm	33-50 cm	32-49 cm
Winkel, Brustpolster	5° bis 35°	0 bis 30°	-5 bis 20°	5° bis 35°	0 bis 30°	-10° bis 20°
Die Messungen am Mustang wurden mit senkrechter Mittelsäule durchgeführt						

	Größe 3			Größe 4		
	Loch 1	Loch 2	Loch 3	Loch 1	Loch 2	Loch 3
Höhe zwischen Boden und Achsel	72-105 cm	71-105 cm	69-105 cm	89-130 cm	87-130 cm	85-128½ cm
Höhe zwischen Boden und Achsel (mit Unterarm-Auflagen)	76½-105 cm	75½-105 cm	73½-109½ cm	93½-130 cm	91½-130 cm	89½-130 cm
Höhe zwischen Sitz und Boden	34-70 cm	31-68 cm	29-66 cm	50-85½ cm	49-85 cm	46-82 cm
Winkel, Brustpolster	-3° to 45°	-6° to 40°	-8° to 48°	-5° to 33°	-7° to 35°	-10° to 29°
Die Messungen am Mustang wurden mit senkrechter Mittelsäule durchgeführt						

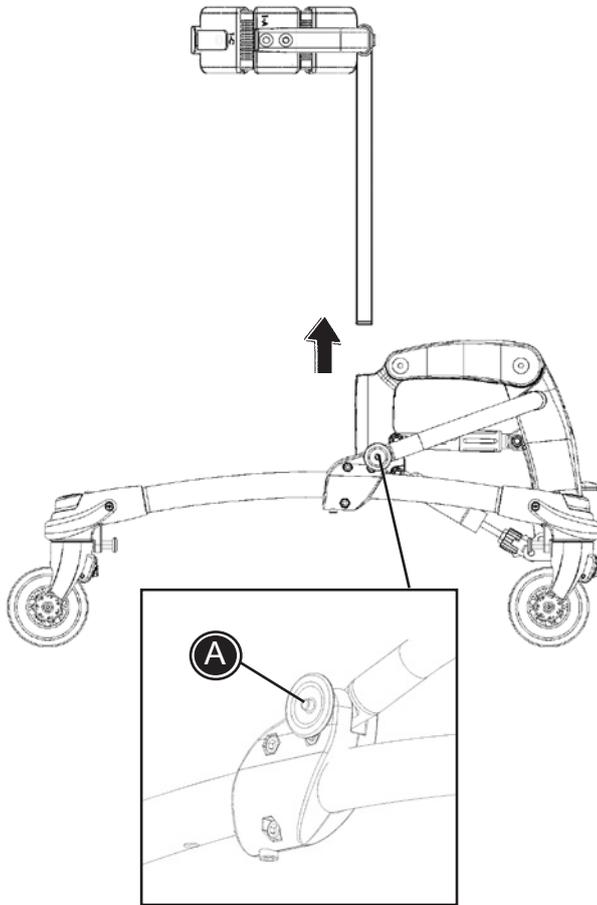


ZUSAMMENKLAPPEN FÜR DEN TRANSPORT

- Entfernen Sie das Brustpolster
- Entfernen Sie die Sicherungstifte (A) auf beiden Seiten
- Drücken Sie das Pedal (B) um den Rahmen zusammen zu klappen
- Setzen Sie die Sicherungstifte (A) wieder ein, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.


 Achten Sie darauf, daß Sie beim zusammenklappen nicht Ihre Finger einklemmen.

 Stellen Sie sicher, daß sowohl der Mustang als auch alle Zubehörteile beim Transport im Auto gut gesichert sind.

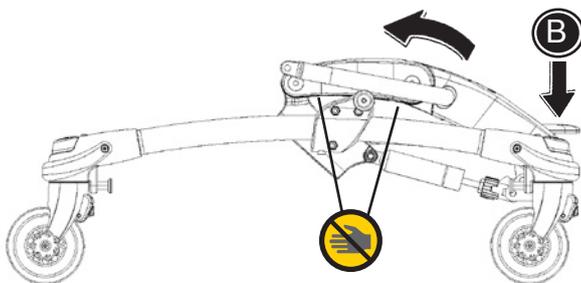

D

PRODUKT-IDENTIFIZIERUNG

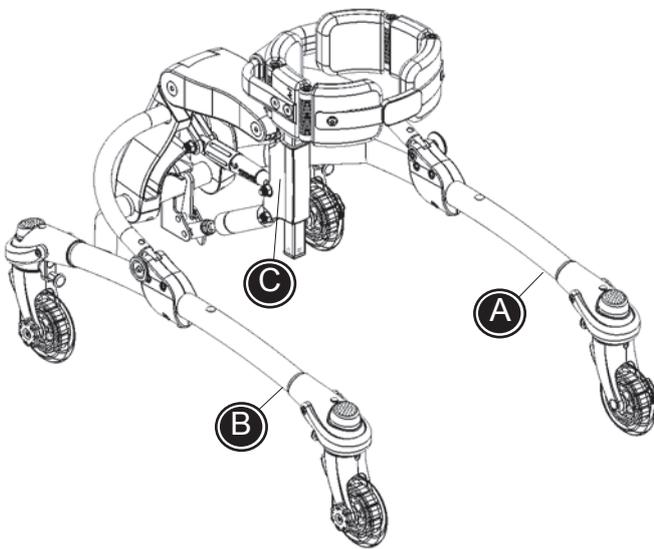

A) Seriennummer

Die Kennzeichnung befindet sich an der Unterseite des Gestells direkt neben dem linken Hinterrad.

B) Hersteller

Die Kennzeichnung befindet sich an der Unterseite des Gestells direkt neben dem rechten Hinterrad.

C) Max. Körperlänge des Kindes (vom Boden bis zur Achsel)

Die Kennzeichnung befindet sich auf der linken Seite der Mittelsäule.



Größe 1



Größe 2



Größe 3



Größe 4

D

WARTUNG, PFLEGE UND WIEDEREINSATZ

GESTELL

Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben. Außerdem ist es wichtig, den Mustang sauber zu halten - einerseits aus Hygienegründen, andererseits um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. Achten Sie besonders darauf, die Löcher für die Richtungsfeststeller zu säubern. Waschen Sie das Gestell mit Autoshampoo oder Spülmittel. Falls der Mustang übermäßig verschmutzt sein sollte, darf ein Fettlöser verwendet werden.

INSPEKTION

Es ist wichtig, alle Schrauben am Gestell und an den Zubehörteilen möglichst häufig zu überprüfen und festzuziehen. Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Festbremse vor jeder Benutzung. Kontaktieren Sie einen autorisierten Fachhändler, wenn die Funktionsfähigkeit der Feststellbremse beeinträchtigt ist, um diese zu ersetzen. Darüber hinaus muss unbedingt auf Anzeichen für Risse am Gestell, den PVC-Teilen usw. geachtet werden.

REPARATUR

Falls ein Problem mit Ihrem Mustang auftritt, sollten Sie sich unverzüglich an Ihren Händler wenden. Defekte Mustangs sollten nicht verwendet werden. Falls Ihr Mustang überholt oder repariert werden muss, dürfen nur R82-Originalteile verwendet werden. Defekte Zubehörteile oder Ersatzteile können zur Reparatur an R82 geschickt werden. Falls Probleme mit dem Gestell auftreten, muss der vollständige Mustang zur Reparatur an R82 geschickt werden. R82 übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die aus dem Gebrauch von Drittanbieterteilen bzw. aus Reparaturen resultieren, die von einer nicht autorisierten Person vorgenommen wurden. Nur R82-Originalteile und Reparaturen durch autorisierte R82-Mitarbeiter sind zulässig.

Wiedereinsatz

Der Gehtrainer Mustang ist für den Wiedereinsatz geeignet. Beim Wiedereinsatz ist es jedoch notwendig, dass eine Bedienungsanleitung vorhanden sein muss. Sollte keine verfügbar sein, erhalten Sie die Bedienungsanleitung als download unter www.R82.de. Um den Wiedereinsatz realisieren zu können, machen sie sich mit den Funktionen des Produktes vertraut. Sollten Sie das Produkt nicht kennen, studieren Sie vor der Wiedereinsatzprüfung die Bedienungsanleitung. Reinigen Sie das Produkt vor Prüfbeginn und führen Sie dann gemäß Wartungsplan die entsprechende Prüfung durch. Beachten Sie ggf. in der Bedienungsanleitung enthaltene Pflegeanweisungen und produktspezifische Prüfanweisungen.

D FEHLERBEHEBUNG

Problem

Lösung

Das Gehgestell scheint wackelig zu sein.

Sämtliche Schrauben festziehen.

Der Mustang lässt sich zu leicht/schwer vorwärtsbewegen.

Vergewissern Sie sich, dass die Feststellbremsen und die Rücklaufstopper gelöst sind. Lockern Sie den Griff der Schleifbremse (bzw. ziehen Sie den Griff fester an), um die Kraft zu regulieren, die für die Bewegung des Mustang erforderlich ist.

Die Rücklaufstopper funktionieren nicht.

Entfernen Sie den Schmutz von der Vorrichtung und reinigen Sie die Räder.

Das Pedal für die Höhenverstellung funktioniert nicht.


Entfernen Sie jeglichen Schmutz von der Vorrichtung.

Die Höhenverstellung funktioniert nicht.

Konsultieren Sie Ihren örtlichen Leistungserbringer, damit dieser die Höhenverstellung vornimmt oder die Gasfeder austauscht.

Die Feststellbremse funktioniert nicht

Säubern Sie die Feststellbremse. Kontaktieren Sie einen autorisierten Fachhändler, um die Feststellbremse zu ersetzen.

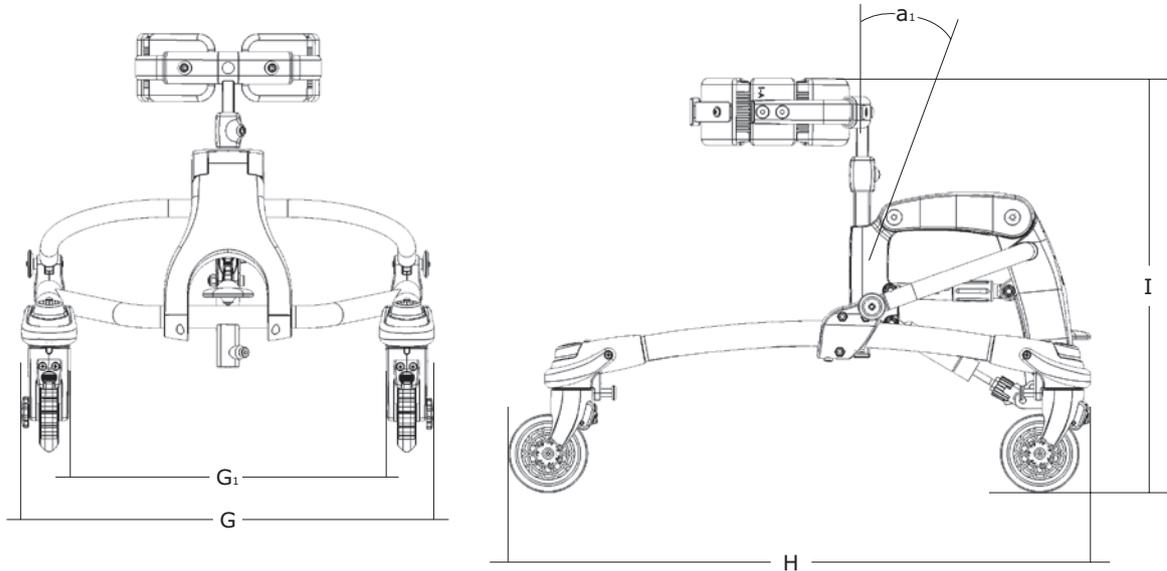

ABMESSUNGEN

Breite, gesamt (G)
 Breite, Gestell innen (G1)
 Breite, Brustpolster, innen (G2)
 Länge, gesamt (H)
 Höhe, gesamt (I)
 Sitzhöhe über Boden (Sitz = Zubehör)
 Breite zwischen Griffen (Griffe = Zubehör)
 Höhe zwischen Boden und Griffen (Griffe = Zubehör)
 Neigungsbereich der Mittelsäule (a1)
 Schwenkradius
 Achselhöhe, zwischen Boden und Achsel
 Standardgewicht ohne Zubehör
 Max. Belastbarkeit/Gewicht des Kindes

Größe 1

52 cm (20¼")
 38 cm (14¾")
 16½-23½ cm (6½-9")
 75 cm (29¼")
 65 cm (25½")
 17-35 cm (6½-13½")
 14-35 cm (5½-13½")
 37-58 cm (14½-22½")
 0-30°
 45 cm (17½")
 38-65 cm (14¾-25½")
 10 kg (22 lb)
 30 kg (66 lb)

Größe 2

63 cm (24½")
 45 cm (17½")
 23½-27 cm (9-10½")
 90 cm (35")
 85 cm (33½")
 33-50 cm (12¾-19½")
 14-35 cm (5½-13½")
 51-71 cm (20-27¾")
 0-30°
 55 cm (21½")
 60-85 cm (23½-33½")
 14 kg (31 lb)
 40 kg (88 lb)

Breite, gesamt (G)
 Breite, Gestell innen (G1)
 Breite, Brustpolster, innen (G2)
 Länge, gesamt (H)
 Höhe, gesamt (I)
 Sitzhöhe über Boden (Sitz = Zubehör)
 Breite zwischen Griffen (Griffe = Zubehör)
 Höhe zwischen Boden und Griffen (Griffe = Zubehör)
 Neigungsbereich der Mittelsäule (a1)
 Schwenkradius
 Achselhöhe, zwischen Boden und Achsel
 Standardgewicht ohne Zubehör
 Max. Belastbarkeit/Gewicht des Kindes

Größe 3

65 cm (25½")
 50 cm (19½")
 30-40 cm (11¾-15½")
 100 cm (39")
 105 cm (41")
 45-68 cm (17½-26½")
 14-60 cm (5½-23½")
 65-90 cm (25½-35½")
 0-25°
 55 cm (21½")
 70-105 cm (27½-41")
 18 kg (40 lb)
 60 kg (132 lb)

Größe 4

70 cm (27½")
 56 cm (22")
 30-40 cm (11¾-15½")
 110 cm (43")
 130 cm (50½")
 62-84 cm (24-32¾")
 14-60 cm (5½-23½")
 81-125 cm (31½-50")
 0-25°
 62 cm (24¼")
 87-130 cm (34-50½")
 19 kg (42 lb)
 80 kg (176 lb)

Die Messungen am Mustang wurden mit senkrechter Mittelsäule durchgeführt, der standardmäßig auch in diesem Zustand ausgeliefert wird. Unterschiedliche Einstellungen können zu anderen Messwerten führen. Um einige der oben genannten Messwerte zu erzielen, kann unter Umständen eine geringfügige Anpassung erforderlich sein. Wir haben diverse Typen von Zubehörteilen im Angebot. Aus diesem Grund wird das Gewicht ohne Zubehör aufgelistet.

TECHNISCHE DATEN

Gestell: Pulverbeschichtetes Stahl
Kunststoffteile: Glasfaserverstärktes Nylon / ABS

HERSTELLER

R82 A/S
Parallelvej 3
DK- 8751 Gedved

VERTRETER



Ihren Distributor finden Sie auf www.R82.com