


Bischoff & Bischoff


Návod k použití

DH-40/L



Enjoy mobility.

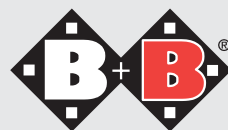

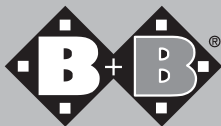

DH-40/L **(pomůcka pro sprchování)**

Vážený zákazníku,


pořízením této pomůcky pro sprchování B+B získáváte špičkový německý výrobek, který se již tisícinásobně osvědčil v profesionální praxi.

Tento návod k použití Vás má lépe obeznámit s obsluhou a manipulací s Vaší pomůckou pro sprchování B+B, a tím zvýšit bezpečnost.

Přejeme Vám hodně radosti z našeho výrobku.

1. Pozor – bezpečnostní upozornění – analýza rizik podle DIN EN ISO 13485

- Max. nosnost 110 kg
- Všechny 4 vnější nohy nastavte na stejnou výšku
- Dbejte na správné usazení aretačních kolíků
- Dbejte na pevné usazení připevňovacích šroubů sedací plochy
- Dbejte na správné usazení zádové opěrky.

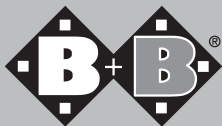

Část nohy A

Připevňovací šrouby


Šrouby pro přídržná madla

Fixační šroub (nejdelší šroub)

Připevňovací šrouby

Část nohy B

Aretační kolík pro
nastavení výšky

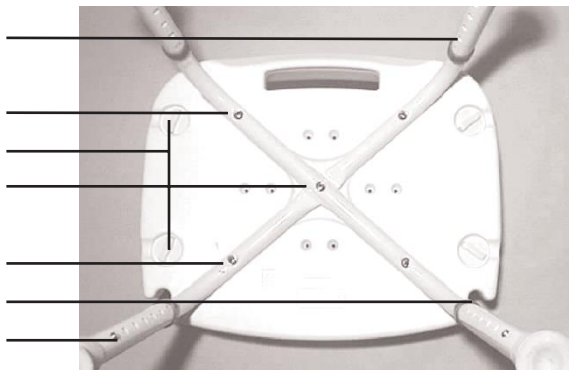

1. Nastavení výšky sedáku

Obě části noh jsou výškově nastavitelné. Aretační kolíky (obr. 1) zatlačte dovnitř a vnější nohy nastavte na požadovanou výšku. Výšku sedáku lze nastavit v 8 pozicích.

Dbejte na to, aby aretační kolíky opět zaskočily!

Nakonec přes vnější nohy nasuňte gumová těsnění.

Všechny čtyři vnější nohy musí být nastaveny na stejnou výšku!

Stolička do sprchy se dodává s neklouzavými gumovými patkami. Na přání lze objednat patky s přísavkami.

2. Montáž noh A + B

Sedák položte spodní stranou před sebe (obr. 1). Vezměte části noh A + B, položte je křížem přes sebe (gumové patky nahoru, zploštělá místa slicování musí zabíhat do sebe) a obě části noh zafixujte pomocí šroubu (fixační šroub s podložkou a pojistným kroužkem) uprostřed sedáku. Střed stoličky do sprchy zajistěte nejdelším šroubem. Nyní ustavte části noh tak, abyste mohli zbývajících čtyřmi šrouby (s podložkami) připevnit části noh A + B k sedáku.

Zkontrolujte, zda všechny připevňovací šrouby pevně sedí!

3. Montáž zádové opěrky (pouze DH-40/L)

Zádovou opěrku (obr. 3) zatlačte anatomicky tvarovanou stranou do připraveného výřezu (obr. 2).

Důležité upozornění

Spodní část zádové opěrky musí vyčnívat na spodní straně sedáku cca 5 mm!



3. Nastavení výšky sedáku

Obě části noh jsou výškově nastavitelné.

Aretační kolíky (obr. 1) zatlačte dovnitř a vnější nohy nastavte na požadovanou výšku.

Výšku sedáku lze nastavit v 8 pozicích.



Dbejte na to, aby aretační kolíky opět zaskočily!

Nakonec přes vnější nohy nasuňte gumová těsnění.

Všechny čtyři vnější nohy musí být nastaveny na stejnou výšku!


Stolička do sprchy se dodává s neklouzavými gumovými patkami. Na přání lze objednat patky s přísavkami.



Obr. 2



Obr. 3

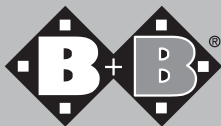

4. Připevnění bočních madel

Madla zasuněte shora do připravených výřezů a zdola je připevněte pomocí šroubů (obr. 1).

Zkontrolujte, zda šrouby pevně sedí.

5. Uchycení sprchové hlavice ve stoličce

Na přední straně sedáku stoličky se na vnějších stranách nachází dvě uchycení pro sprchovou hlavici, do kterých lze během péče o tělo sprchovou hlavici umístit.



6. Čištění stoličky do sprchy

K čištění stoličky do sprchy používejte pouze jemné, běžné čisticí prostředky.

7. Technické údaje



Max. nosnost:	110 kg
Šířka sedáku:	50 cm
Výška sedáku:	40–57 cm (78–95,5 cm)
Hloubka sedáku:	40 cm
Hmotnost DH 40 (L):	4,1 kg.

Záruční list

(Dodržujte naše všeobecné obchodní podmínky)

Typ: Stolička do sprchy DH-40/L

Sériové číslo:*

(vyplní specializovaný obchod)

Specializovaný prodejce:

Datum a razítko

*Informační štítky se nachází na bočním rámu

REHA 2015, s.r.o. | Bohunická 52
619 00 Brno | Czech Republic
info@reha2015.cz
www.reha2015.cz

REHA 2015
HELPING THE NEEDY

oficiální distribuce a autorizovaný servis Bischoff & Bischoff pro ČR

Bischoff & Bischoff GmbH

Im Stöckmädle 13
D-76307 Karlsbad
Tel.: +49 72 48 92 0 92
info@bischoff-bischoff.de
www.bischoff-bischoff.com

