


**Bischoff & Bischoff**


Návod k použití

## **DH-40 Round**



Enjoy mobility.

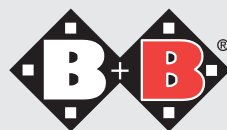

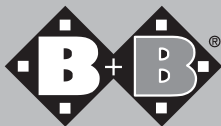

## **DH-40 Round** **(stolička do sprchy)**

### **Vážený zákazníku,**

pořízením této pomůcky pro sprchování B+B získáváte špičkový německý výrobek, který usnadní péči v domácích podmínkách.

Tento návod k použití Vás má lépe seznámit s obsluhou a manipulací s Vaší pomůckou pro sprchování B+B a zvýšit bezpečnost.

Přejeme Vám hodně radosti z nového výrobku!

## 1. Prohlášení o shodě

B+B prohlašuje jako výrobce produktu, že stolička do sprchy „DH-40 Round“ plně vyhovuje požadavkům směrnice 93/42/ EHS.

## 2. Pokyny k používání výrobku

Stolička do sprchy „DH-40 Round“ je koncipována výhradně pro sezení při sprchování.

## 3. Účel použití / indikace

Nestabilita / neschopnost stát při omezení používání / chybějící funkčnosti dolních končetin, (např. při ztrátě síly při zhoubných onemocněních, chronická, pokročilá kardiovaskulární a plicní onemocnění) kombinovaná se slabostí držení těla.



Obr. 2

#### 4. Pozor – bezpečnostní upozornění! Analýza rizik podle DIN EN 13485


- Při usedání a vstávání je nutný doprovod jiné osoby
- Všechny 4 nohy stoličky nastavte na stejnou výšku
- Dbejte na správné usazení aretačních kolíků
- Při těsném upevnění sedací plochy na rám sedáku pozor: nebezpečí přiskřípnutí.
- Sedací plocha pouze k sezení.

#### 5. Sestavení a montáž

Teleskopické trubky umístěte podle obrázku do drážek sedací plochy a připevněte pomocí 5 šroubů s válcovou hlavou.

Teleskopické trubky

Sedací plocha

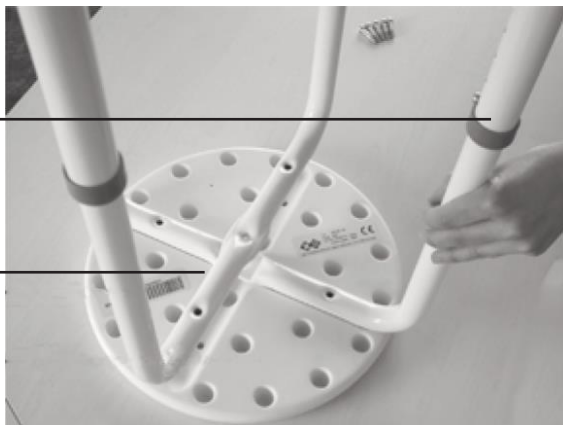

Obr. 3

## 6. Nastavení výšky sedáku


Teleskopické trubky umístěte podle obrázku do drážek sedací plochy a připevněte pomocí 5 šroubů s válcovou hlavou. Oba díly noh jsou výškově nastavitelné v šesti polohách (rozsah nastavení 10 cm). Pro nastavení výšky stiskněte aretační kolík a posuňte teleskopickou nohu do požadované pozice. Aretační kolík při překlenutí aretačního otvoru samočinně zapadne. Všechny čtyři vnější nohy musí být nastaveny na stejnou výšku!

## 7. Čištění a dezinfekce stoličky do sprchy

K čištění a dezinfekci používejte pouze běžné prostředky.



Obr. 4

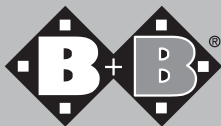

## 8. Technické údaje

- Max. nosnost: 120 kg.
- Š/h/v (v mm): 420 / 420 / 440-540
- Hmotnost: 1,7 kg.
- Výška sedáku: 440-540 mm, 6 poloh  
přes aretační kolík
- Šířka/hloubka sedací plochy: 330 / 330 mm
- Barva: bílá

## 9. Označení výrobku

Na spodní straně sedací plochy výrobku je umístěna nálepka s označením, kde najdete označení výrobku / sériové číslo / max. hmotnost uživatele / adresu firmy.

## 10. Označení výrobku

Za výrobek můžeme ručit pouze tehdy, pokud je používán za stanovených podmínek a k určeným účelům. Výrobek musí být vrácen v původním obalu.

## 11. Dodávaná sériová výbava

- 1x sedací plocha B+B z plastu
- 2x teleskopické trubky s výškově nastavitelnými nohama
- 5x šroub s válcovou hlavou M6 x 28 podle DIN 84

## Záruční list

(Dodržujte naše všeobecné obchodní podmínky)

Typ: DH-40 Round

Sériové číslo:\*

(vyplní specializovaný obchod)

**Specializovaný prodejce:**

Datum a razítko

\*Informační štítky se nachází na bočním rámu

REHA 2015, s.r.o. | Bohunická 52  
619 00 Brno | Czech Republic  
[info@reha2015.cz](mailto:info@reha2015.cz)  
[www.reha2015.cz](http://www.reha2015.cz)

**REHA 2015**  
HELPING THE NEEDY

oficiální distribuce a autorizovaný servis Bischoff & Bischoff pro ČR

**Bischoff & Bischoff GmbH**

Im Stöckmädle 13  
D-76307 Karlsbad  
Tel.: +49 72 48 92 0 92  
[info@bischoff-bischoff.de](mailto:info@bischoff-bischoff.de)  
[www.bischoff-bischoff.com](http://www.bischoff-bischoff.com)

